

Памятка для новых пользователей мультифокусных линз Essilor®**Поздравляем!**

Вы получили Ваши первые очки с мультифокусными линзами от Essilor®! Эти универсальные очки позволяют Вам видеть четко вблизи, на среднем расстоянии и вдали. Чтобы научиться пользоваться новыми очками с мультифокусными линзами, может потребоваться время. Вот несколько рекомендаций, как сделать этот процесс более быстрым и комфортным.

1 Откажитесь от своих старых очков, старайтесь носить новые очки как можно чаще – так Вы будете уверенно чувствовать себя в очках намного быстрее.

2 Небольшой дискомфорт или головокружение сразу после надевания очков – это нормально. Дайте своему мозгу несколько секунд, чтобы привыкнуть к новому качеству изображения.

3 Начните с постоянного использования очков дома: читайте, смотрите телевизор, работайте с ПК. Затем гуляйте в них по улице. Когда почувствуете полный комфорт в новых очках – садитесь за руль.

В ваших новых очках есть все нужные диоптрии для четкого зрения на всех расстояниях:

- чтобы читать книгу, отвечать на сообщения в телефоне и выполнять другие задачи на близком расстоянии, просто опустите глаза в нижнюю часть линзы, чтобы видеть все четко
- чтобы видеть вдаль, просто посмотрите вперед через верхнюю область линзы
- чтобы видеть четко на среднем расстоянии, посмотрите в среднюю часть линзы.

При необходимости четко видеть экран ноутбука или общаться с собеседником, можете немного приподнять подбородок.

5 Если ранее Вы не носили очки на улице, в первое время будьте аккуратны при спуске по лестнице или ходьбе по неровной дороге, старайтесь чуть ниже опускать голову, когда спускаетесь по ступенькам. Через несколько дней вы перестанете это замечать и нужные движения головой будут происходить автоматически.

**Мультифокусные очки с линзами Essilor® – это отличная инвестиция в здоровье, комфорт ваших глаз, а также стабильное четкое зрение при любых условиях!
Желаем Вам приятного ношения очков!**

#1 В МИРЕ В КАТЕГОРИИ ЛИНЗ ДЛЯ ОЧКОВ*